

IPOS - Medical

EU Distributor: IPOS - HANDEL GmbH
Robert-Bosch-Str. 3 89250 Senden +49 7307 35804-33
info@ipos-medical.de www.ipos-medical.de



(EU) 2016/425 CЕ 2841
EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR
**ATEMSCHUTZMASKE
FFP2**

(HR) Maska FFP2

Svrha uporabe

Maska FFP2 je osobna zaštitna oprema (OZO) i štiti korisnika maske prvenstveno od čestica, kapi i aerosola. Služi za zaštitu sebe i drugih filtriranjem zraka pri udisanju i izdisanju.

Postavljanje maske

Obratite pozornost na piktogramе u ovim uputama i na ambalaži koji opisuju postavljanje maske.

Prije uporabe

- Prije postavljanja maske provjerite jesu li vam ruke čiste. Provjerite postoje li oštećenja na svim sastavnim dijelovima maske. Ako je maska oštećena, nemojte je upotrebljavati, već je odmah skinite.
- Prije postavljanje maske temeljito operite ruke.
- Otvorite masku tako da se formira oblik šalice.
- Namjestite masku na područje usta i nosa i prilagodite nosnu potporu obliku vašeg nosa.
- Objema rukama postavite trake za uši preko ušiju.
- Prije uporabe provjerite da li dobro pristaje tako što ćete provesti sljedeći test:

- Pokrijte masku s obje ruke, pri tome ne ometajući postavljenu masku.
- Snažno izdahnite. Ako zrak izlazi oko nosa, prilagodite oblik nosne potpore kako je gore opisano.
- Ako zrak izlazi na rubovima maske, ispravite položaj traka za uši. Ako ne uspijete pravilno postaviti masku, ne smijete ulaziti u opasno područje.

Upozorenja i ograničenja

- Korisnik mora biti upoznat s uporabom maske i slijediti upute.
- Maska ne opskrbljuje kisikom, stoga njezina uporaba ovisi o atmosferi okoline. Upotrebljavajte samo u dobro prozračenim prostorima. Ne upotrebljavajte masku u eksplozivnoj atmosferi.
- Prije uporabe provjerite je li maska oštećena.
- Dlake na licu i kosa mogu uzrokovati curenje zraka.
- Maska se ne smije stiskati ili deformirati.
- Nemojte prati.
- U masku nemojte stavljati ručnik, maramicu itd.
- Nemojte dodirivati površinu maske kada je nosite.
- Ako je maska kontaminirana, nemojte je upotrebljavati.
- Skinite masku na kraju smjene. Ne dirajte rukama tijelo maske. Nakon što skinete masku, očistite ruke.
- OVDJE OPISANA UPOZORENJA ODNOSE SE NA UKUPNO VRIJEME UPORABE MASKE. NEPOŠTIVANJE MOŽE UZROKOVATI BOLEST I ŠTETU ZA ZDRAVLJE.

Dozvole

Ovaj proizvod je odobren u skladu s DIN EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR.

2022/01/01

	Proizvod za jednokratnu uporabu
	Pridržavajte se priloženih uputa za upotrebu
	Upozorenja i ograničenja
	Upozorenja i ograničenja
	Raspon temperature
	Datum isteka valjanosti
	Datum proizvodnje
	Adresa proizvođača

EU-Konformitätserklärung



IPOS-Modul C2



IPOS-CE-Zertifikat



ISO 9001 TÜV-Süd



ISO 13485

